



## Selectrol®



TCS Biosciences Ltd

Botolph Claydon Buckingham MK18 2LR Ir-Renju Unit

t: +44 (0)1296 714222

f: +44 (0)1296 714806

e: [sales@tcsgroup.co.uk](mailto:sales@tcsgroup.co.uk)

i: [www.tcsbiosciences.co.uk](http://www.tcsbiosciences.co.uk)



TCS Biosciences Europe B.V

Provincialeweg 6, Kornhorn, in-Netherlands



ISO 9001 FS28907  
ISO 14001 EMS 590359

HARĠA NRU 14  
MARZU 2023

## SELECTROL® DISCS

Selectrol® Discs huma mikroorganizmi mnoxfa bil-friza tal-ewwel ġenerazzjoni mmanifatturati esklussivament minn kulturi NCTC® (Kollezzjoni Nazzjonali ta' Kulturi tat-Tip) u NCPF® (Kollezzjoni Nazzjonali ta' Fungi Patoġeniċi). Huma ppreservati waqt hażna fit-tul bħala ċelloli mnoxfa bil-friza sabiex jimminimizzaw kwalunkwe alterazzjoni fil-fenotip ikkawżata minn mutazzjonijiet.

L-użu ta' Selectrol® Discs huwa standardizzat, għalhekk l-ispeċi kollha huma furnuti b'dawn l-Istruzzjonijiet ġenerali għall-Użu (IFU). Lista shiha ta' speċi, flimkien mad-deskrizzjoni, il-kodiċi tal-prodott u d-daqs tal-pakkett (fornuti bħala kunjetti ta' 5, 10 jew 25 diska) tista' tinstab online: <https://www.tcsbiosciences.co.uk/qcerts/>

### Użu intenzjonat

Selectrol® Discs huma adattati għall-użu fl-laboratorji għall-kontroll tal-kwalità tal-midja tal-kultura, testijiet ta' identifikazzjoni bijokimika u ttestjar ta' suxxettibilità antimikrobika.

Selectrol® Discs huma użati f'applikazzjonijiet mikrobijoloġiċi biex jikkontrollaw u jivvalidaw il-proċeduri ta' iżolament u ttestjar użati biex jiskopru u jidentifikaw mikroorganizmi patoġeniċi. Jintużaw ukoll biex jikkontrollaw l-identifikazzjoni manwali jew awtomatizzata sussegwenti u l-ittestjar tas-suxxettibilità ta' iżolati sinifikanti, li jinvolvu bijokimika jew b'determinazzjoni MIC, Maldi-Tof, diffużjoni tad-diska jew metodoloġija molekulari (ara Limitazzjonijiet).

Kull speċi ta' Selectrol® hija identifikata bl-isem tal-organizmu u n-numru tal-ġbir tal-kultura u tippossejdi waħda jew aktar karatteristiċi speċifiċi għal skopijiet ta' kontroll tal-kwalità.

Proċeduri ta' ttestjar, midja rakkomandata, aġġornamenti u organizmi ta' kontroll xierqa huma deskritti f'dokumenti, bħal dawk disponibbli minn EUCAST, ISO, CLSI, il-Manwal tal-Mikrobijoloġija Klinika u UKHSA.

L-użu ta' Selectrol® Discs huwa proċess manwali u jipprovi riżultat kwalitattiv.

### Prekawzjonijiet u hażna

- Għal użu professjonali biss.
- Selectrol® Discs fihom organizmi patoġeniċi vijabbli tal-Kategorija 1 u tal-Kategorija 2 u għandhom jintużaw biss fl-laboratorji mgħammra b'mod xieraq minn mikrobijoloġisti jew persuni taħt is-superviżjoni ta' mikrobijoloġisti kwalifikati b'taħriġ jew esperjenza biex jaħdmu ma' mikroorganizmi.
- Ażhen fit-temperatura indikata fuq it-tikketta. Jista' jsehh telf ta' vijabbiltà jekk id-diski jithallew 'il fuq minn din il-firxa tat-temperatura għal aktar milli mehtieg.
- Halli l-kunjetti jilhaq it-temperatura tal-ambjent qabel jinfetħ u poġġi l-għatu u s-soddieda fuq kull kunjett immedjatament wara li titneħha diska. L-umdità fl-arja li tidhol fil-kunjett tikkawża tnaqqis fin-numru ta' organizmi vijabbli, li eventwalment iwassal għal telf shih tal-vijabbiltà.
- Tużax diski wara d-data ta' skadenza tagħhom. Dawn jistgħu juru telf ta' vijabbiltà.

### Rappurtar ta' incidenti serji

**UE biss:** L-utenti għandhom jirrapurtaw kwalunkwe incident serju relatat mal-apparat lill-Manifattur u lill-Awtorità Nazzjonali Kompetenti.

**Barra mill-UE:** Ikkuntattja lit-TCS għal kwalunkwe incident jew inkješta relatata ma' dan l-apparat. Dettalji ta' kuntatt: [QC@tcsgroup.co.uk](mailto:QC@tcsgroup.co.uk) jew +44 (0) 1296 714222

## ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

**Biex tneħhi d-diska mill-kunjett:** Diska titneħha faċilment mill-kunjett bl-użu ta' forċipi sterili jew linja ta' inokulazzjoni sterili ta' 10µl.

**Għall-użu fuq midja solida:** Poġġi Diska fuq mezz solidu xieraq. Halli d-diska tirtab għal 10 – 15-il minuta. Il-panċa tista' titqiegħed f'inkubatur biex thaffef il-proċess. Ifrex id-Diska mrattba madwar il-panċa u inkuba taħt l-aħjar kundizzjonijiet għall-ispeċi.

**Għall-użu f'midja likwida:** Poġġi d-Diska f'1-10ml tal-likwidu (broth) xieraq. Evita l-produttjoni ta' aerosols, hawwad il-likwidu bil-mod biex tħalli id-Diska u inkuba taħt kundizzjonijiet ottimali.

Inkella, għal użu rapidu, holl id-Diska, halli l-kultura tirkupra billi tinkuba f'35 – 37°C għal siegħa u mbagħad uża immedjatament. Permezz tal-sperimentazzjoni tkun tista' ssib l-aħjar dilwizzjoni għall-appikazzjoni tiegħek stess.

### Stabbiltà fl-użu

L-istabbiltà fl-użu hija speċifika għall-ispeċi. Din l-informazzjoni tidher fuq ir-Rapport tat-Test tal-Kontroll tal-Kwalità għal Selectrol® Discs bħala "Hażna" u "Nota Importanti: Uża fi żmien x xhur mill-ftuħ". Rapporti tat-Test tal-Kontroll tal-Kwalità għall-kodiċijiet kollha tal-prodott / numri tal-lott jistgħu jtniżżlu billi żżur: <https://www.tcsbiosciences.co.uk/qcerts/>

### Limitazzjonijiet

Sottokultura ripetuta tista' tikkawża li l-karatteristiċi ta' speċi jinbidlu. Is-Selectrol® Disc hija subkultura tal-ewwel ġenerazzjoni minn kultura ewlenija li ġeja mill-Kollezzjonijiet tal-Kultura tal-UKHSA, u hija mfassla biex tintuża biex tikseb kulturi tal-istokk tax-xogħol għall-użu fl-ittestjar. Huwa ġeneralment aċċettat li mhux aktar minn hames passaġġi (sottokulturi suċċessivi) għandhom isiru mill-kultura prinċipali, sabiex jiġu evitati drift ġenetiku u għażla mutanti. Għalhekk, m'għandhomx isiru aktar minn erba' passaġġi mill-kultura tal-istokk tax-xogħol tas-Selectrol® Disc.

L-użu f'sistemi ta' kultura awtomatizzati għandu jiġi validat mill-utent aħhari.

### Ksur, tixrid u rimi

1. Id-Diski kollha esposti, l-imballaġġ ikkontaminat u l-oġġetti tal-ħġieġ miksuri għandhom jitqiegħed f'kontenitur adattat u jew incinerati jew ittrattati fawtoklavi f'121°C għal 30 minuta.
2. Kunjetti mhux miftuħin jistgħu jtnieħhew bil-forċipi, jinhaslu f'soluzzjoni batteriċida xierqa, jidhalu, jtnixxuf u jinżammu għal aktar użu.

L-uċuħ kollha kkontaminati għandhom jiġu ddiżinfettati b'soluzzjoni batteriċida xierqa.

### Termini

EUCAST – Kumitat Ewropew dwar l-Ittestjar tas-Suxxettibilità Antimikrobika  
CLSI – Istitut tal-Istandards Kliniċi u tal-Laboratorju  
UKHSA – UK Health Security Agency, li qabel kienet magħrufa bħala PHE Public Health England  
ISO – International Organization for Standardization

### Referenzi

Manual of Clinical Microbiology: 12-il edizzjoni (ASM Books)

### Traduzzjonijiet tal-Istruzzjonijiet għall-użu



Ara s-sit web <https://www.tcsbiosciences.co.uk/qcerts/>